

DEMOS: Anvendelse Af Plaster På Ryggen

Denne vejledning vil hjælpe dig med hurtigt og sikkert at anvende B-plasteret, så sensoren forbliver på plads og giver præcise målinger under brug.

1. Sensor forberedelse

- 1 Åben posen med plastret.



- 2 Ved nummer (1) er et lille hylster, som sensorer skal placeres i.

Det er VIGTIGT, at klistermærket DEMOS-25 vender op mod hylstrets buede side, så man kan ane teksten igennem plastret, som vist på billedet



- 3 Herefter fjernes papirdelen ved (1) og der trykkes nu ned rundt om siden på sensoren, så den klistres fast ind i "hylsteret".



Plasteret er klar! Venligst fortsæt til sensorens monteringstrin ➔

2. Sensor montering

- 1 Fjern herefter folien på bagsiden ved (2)




- 2 Plastret skal placeres ca. midt på ryggen, på enten højre eller venstre side af ryggen.



VIGTIGT at plastret placeres så den **runde del** af sensoren **peger mod højre**. Se billede nedenfor.

- 3 Her kan du igen se, at sensoren er vendt rigtigt, hvis du kan ane det DEMOS klistermærke igennem platergitteret. Hvis **plastret ikke vender rigtigt**, vil data ikke være anvendelige.

- 4 Sørg for at trykke rundt om plastret, så det sidder godt fast.

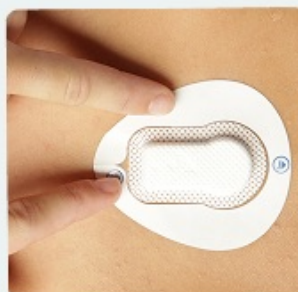

- 5 Herefter fjernes folien på forsiden ved (3) mens man holder på det gennemsigtige plaster under, og det trykkes igen godt fast.



Plastret holder 7-10 dage, efter behov placeres et nyt plaster med sensoren i.

DEMOS-25
Beboerens trivsel i fokus